

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Слушатели приобретают навыки работы со шприц-тюбиком и индивидуальным противохимическим пакетом «ИПП-11».

ПРИМЕНЕНИЕ ШПРИЦ-ТЮБИКА

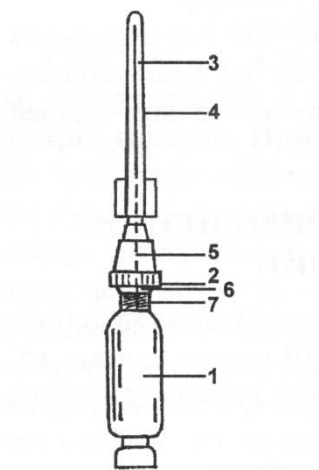


Рис. Шприц-тюбик

Устройство

Шприц-тюбик (рис.) состоит из резервуара (1), заполненного раствором антидота, инъекционной иглы (3), колпачка (4), ребристого пояска (2), который при вращении перемещается по винтовой нарезке (7), увлекая за собой внутренний конец иглы (5), прокалывающей при этом мембрану (6), имеющуюся в верхней части резервуара и обеспечивающей его герметичность до приведения в действие.

Для введения антидота, содержащегося в шприц-тюбике, необходимо:

- 1) снять колпачок, обнажив иглу и направив ее вверх (иглы не касаться!);
- 2) вращением ребристого пояска по часовой стрелке проткнуть внутренним концом иглы мембрану;
- 3) шприц-тюбик взять за резервуар большим и указательным пальцами, расположить его вертикально (!) по отношению к поверхности тела, в которую будет производиться инъекция;
- 4) ввести иглу на всю ее длину в место, предназначенное для инъекции (обычно верхняя поверхность бедра или верхне-наружный квадрант ягодицы);
- 5) выжать из резервуара все его содержимое и, не разжимая пальцев, извлечь иглу.

Примечание. Введение антидота может производиться как через обнаженную поверхность тела, так и (в случае большой срочности) через одежду.

Введение иглы на всю ее длину при вертикальном положении обеспечивает инъекцию антидота внутримышечно, что необходимо для проявления его наибольшей эффективности.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОТИВОХИМИЧЕСКОГО ПАКЕТА «ИПП-11»

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 предназначен для дегазации открытых участков кожных покровов человека (лица, шеи, рук), прилегающих к ним участков одежды и лицевых частей противогазов, зараженных ОВ.

Кроме того, ИПП-11 предназначен для профилактики кожно-резорбтивных и вторичных ингаляционных поражений при заражении ОВ открытых участков кожи.

Пакет ИПП-11 представляет собой герметичный полиэтиленовый пакет с тампоном, пропитанным рецептурой.

Для использования ИПП-11 вскрыть пакет по надрезам, извлечь смоченный дегазационной рецептурой тампон и протереть им кожные покровы, подвергшиеся воздействию ФОС.

Перед проведением работ в очаге заражения ФОС обработать лицо, шею и кисти рук ИПП-11 нанесением рецептуры тонким слоем.

При необходимости, повторная обработка ИПП-11 проводится через 6 часов после первичной.